

新専用容器 取扱い開始のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
このたび、多くの検体量が回収可能な、新専用容器の取り扱いを開始いたします。
なお、新専用容器の取扱い開始のみで、対象項目の内容に変更はありません。
何卒ご了承承賜りますようよろしくお願い申し上げます。

謹白

記

- 実施日 2020年7月7日(火)より発注可
※VS1容器(旧容器記号k)およびVS2容器(旧容器記号k1)の旧容器は併用可能です。

■ 新専用容器を使用する検査項目

検査項目	塗抹鏡検 (口腔・気道・呼吸器) (泌尿器・生殖器) (その他の部位)	院内環境 (ふきとり)
	培養同定 (口腔・気道・呼吸器) (泌尿器・生殖器) (その他の部位)	O157スクリーニング
	嫌気培養 (口腔・気道・呼吸器) (泌尿器・生殖器) (その他の部位)	MRSAスクリーニング
	感受性検査 (口腔・気道・呼吸器) (泌尿器・生殖器) (その他の部位)	



● 塗抹鏡検（口腔・気道・呼吸器） 他 14 項目

多くの検体量が回収可能な、新専用容器の取り扱いを開始します。
 なお、対象となる検査内容に変更はありません。

<対象項目>

項目コード(迅速細菌)	検査項目
5000995(5265N)	塗抹鏡検 (口腔・気道・呼吸器)
5001195(5267N)	塗抹鏡検(泌尿器・生殖器)
5001395(5269N)	塗抹鏡検(その他の部位)
5000296(5208N)	培養同定 (口腔・気道・呼吸器)
5000496(5212N)	培養同定(泌尿器・生殖器)
5000696(5214N)	培養同定(その他の部位)
5009696(5066N)	O157スクリーニング
5009596(5042N)	MRSAスクリーニング

項目コード(迅速細菌)	検査項目
5001596(5277N)	嫌気培養 (口腔・気道・呼吸器)
5001796(5279N)	嫌気培養(泌尿器・生殖器)
5001996(5281N)	嫌気培養(その他の部位)
50020A1(5282N)	感受性検査 (口腔・気道・呼吸器)
50026A1(5284N)	感受性検査(泌尿器・生殖器)
50032A1(5286N)	感受性検査(その他の部位)
50105A1(5240N)	院内環境(ふきとり)

容器記号	新専用容器 概要
VS1 (IBk) VS2 (IBk1)	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>(VS1) ピンクキャップ</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>(VS2) オレンジキャップ</p> </div> </div> <div style="margin-top: 20px;"> <p><使用方法></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. パウチを開封して、スワブと液体培地入りチューブを取り出し、スワブで検体を採取します。 2. 検体採取後、チューブにスワブを挿し入れ、親指と人差し指で軸の端を持ち、スワブの綿軸を折ります。 3. 赤色のマーカで示した綿軸のブレイクポイントを、チューブの縁に寄せ、軸を180度の角度に曲げて、ブレイクポイントで折ります。 4. スワブの軸を静かに回転させて切断を完了させてください。 5. チューブのキャップをしっかりと閉めます。ID ラベルなどを貼付け、ご提出ください。 </div>